


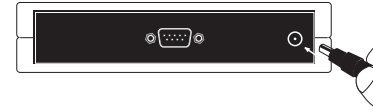

1 ANSLUT MED STRÖMKABEL

Anslut sändaren med strömkabeln. Då OK slutat blinka och övergått till att SEND blinkar är sändaren redo att överföra.




2 ÖVERFÖRING

För överföring av information krävs att sändaren är ansluten med ström. Handhavandet för överföring skiljer sig mellan olika fabrikat av glukosmätare och insulinpump. Se information nedan.

INSULINPUMP Animas IR1200/2020



1. Frigör pumpen från eventuell placering på kroppen.
2. Stoppa pumpen (Meny – Stopp/Starta).
3. Placera pumpen med ryggen mot mitten på sändarens front.

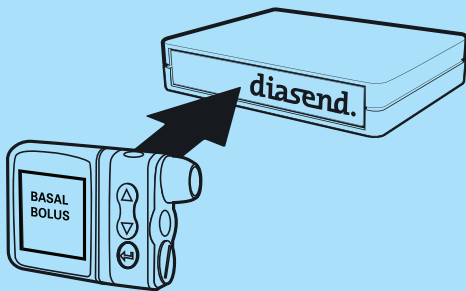

4. Invänta att SEND (överföring) lampan blinkat färdigt och OK-lampan tänds. Information från pumpen finns nu på www.diasend.com. (Observera att en överföring kan ta mellan 2-4 minuter)

Om överföringen bryts och ERROR (fel) lyser – prova igen. Blir det fortfarande fel kontakta support.

5. Överföringen är nu avslutad. Starta igång pumpen i normalt driftsläge (Meny – Stopp/Starta)

GLUKOSMÄTARE



Speciell överföringskabel krävs.

1. Anslut din glukosmätare enligt tabellen nedan:



IR-överföring. Ingen kabel behövs.

Accu Chek Compact Plus		Aktivera IR-överföring genom att hålla inne knapparna S och M på glukosmätaren tills två pilar visas i displayen. Lägg glukosmätaren och rikta dess topp mot mitten på sändarens front.
Accu Chek Aviva		Aktivera IR-överföring genom att hålla inne de två knapparna under displayen tills två pilar visas i displayen. Lägg glukosmätaren och rikta dess topp mot mitten på sändarens front.
Ascensia Breeze2		Anslut glukosmätaren med specifik överföringskabel. Tryck på mätarens ON-knapp.
Ascensia Contour		Anslut glukosmätaren med specifik överföringskabel. Tryck på mätarens M-knapp.
Freestyle		(Gäller för Lite, Mini, Flash, Freedom) Anslut glukosmätaren till sändaren med specifik överföringskabel.
Precision Xceed		Anslut glukosmätaren med specifik överföringskabel.
OneTouch Ultra		(Gäller för Ultra, Ultra 2) Anslut glukosmätaren till sändaren med specifik överföringskabel.
OneTouch Ultrasmart		Anslut glukosmätaren med specifik överföringskabel. Tryck på vänstra svarta knappen.
GlucoCard X-meter		Anslut glukosmätaren med specifik överföringskabel.
GlucoMen Visio		Anslut glukosmätaren med specifik överföringskabel. Starta mätaren med mitten- knappen. Observera hantering av serienummer på www.diasend.com .
GlucSure Extra		Anslut glukosmätaren med specifik överföringskabel. Tryck på mätarens ON-knapp.

2. SEND (överföring) lampan börjar blinka.

3. Invänta att lampan blinkat färdigt och OK-lampan tänds. Värdena finns nu på www.diasend.com. *Om överföringen bryts och ERROR (fel) lyser – prova igen. Blir det fortfarande fel kontakta support.*

SEND – Snabb blinkning:

Överföring av information sker.

SEND – Långsam blinkning:

Sändaren är redo att anslutas till en enhet för överföring.


OK indikerar resultatet av senaste överföring.

OK blinkar vid uppstart då den ansluter till nätet samt gör uppdateringskontroll.

ERROR (fel) lyser om överföringen går fel. Detta kan ske då det är problem i GSM-nätet.



IR: De enheter som har IR överföring skall riktas hitåt.

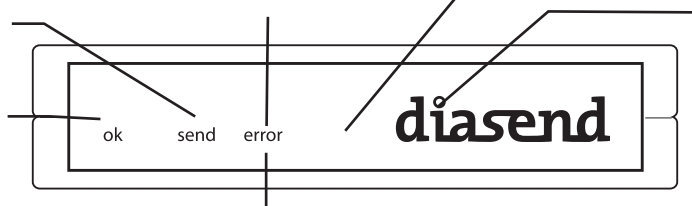

Pricken vid i på diasend lyser då ström är ansluten till sändaren.

Andra indikationer: Om ERROR(fel) blinkar långsamt betyder det att täckningen i GSM nätet är otillräcklig för att överföring skall kunna ske. Inträffar detta prova att flytta sändaren.


3

SE INFORMATIONEN PÅ WWW.DIASEND.COM

Genom att logga in på www.diasend.com ser du den överförda informationen som visas i grafer, tabeller och statistik.

Support: 031 741 17 85
diasend@aidera.se
www.diasend.com

diasend
 det enda som passar alla

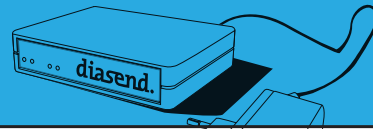


1 ANSLUT MED STRÖMKABEL

Anslut sändaren med strömkabeln. Då OK slutat blinka och övergått till att SEND blinkar långsamt är sändaren redo att överföra.

2 ÖVERFÖRING

För överföring av information krävs att sändaren är ansluten med ström. Handhavandet för överföring skiljer sig mellan olika fabrikat av glukosmätare och insulinpump. Se information nedan.

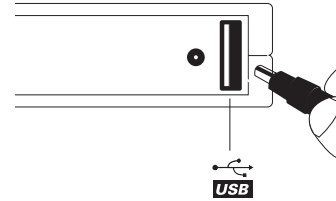

INSULINPUMP Animas IR1200/2020



1. Frigör pumpen från eventuell placering på kroppen.
2. Stoppa pumpen (Meny – Stopp/Starta).
3. Placera pumpen med ryggen mot mitten på sändarens front.
4. Invänta att SEND (överföring) lampan blinkat färdigt och OK-lampan tänds. Information från pumpen finns nu på www.diasend.com. (Observera att en överföring tar c:a 2 minuter)

Om överföringen bryts och ERROR(fel) lyser – prova igen. Blir det fortfarande fel kontakta support.

5. Överföringen är nu avslutad. Starta igång pumpen i normalt driftsläge (Meny – Stopp/Starta)

INSULINPUMP Deltec CoZmo



1. För att aktivera CoZmo insulinpump för överföring tryck på Nedåtpil.
2. Rikta baksidan av pumpen mot fronten på fronten på sändaren. Om överföring inte påbörjas och skärmen släcks - tryck igen på Nedåtpil!
3. Invänta att SEND (överföring) lampan blinkat färdigt och OK-lampan tänds. Information från pumpen finns nu på www.diasend.com (Observera att en överföring tar c:a 4 minuter)

Om överföringen bryts och ERROR(fel) lyser – prova igen. Blir det fortfarande fel kontakta support.

OBS: Batteriet på CoZmo insulinpump måste ha mycket kraft för att överföring skall lyckas!

4. Överföringen är nu avslutad.

GLUKOSMÄTARE



Speciell USB-överföringskabel krävs.

1. Anslut din glukosmätare enligt tabellen nedan:



IR-överföring. Ingen kabel behövs.

Accu Chek Compact Plus		Aktivera IR-överföring genom att hålla inne knapparna S och M på glukosmätaren tills två pilar visas i displayen. Lägg glukosmätaren och rikta dess topp mot mitten på sändarens front.
Accu Chek Aviva		Aktivera IR-överföring genom att hålla inne de två knapparna under displayen tills två pilar visas i displayen. Lägg glukosmätaren och rikta dess topp mot mitten på sändarens front.
Ascensia Breeze2		Anslut glukosmätaren med specifik överföringskabel. Tryck på mätarens ON-knapp.
Ascensia Contour		Anslut glukosmätaren med specifik överföringskabel. Tryck på mätarens M-knapp.
Freestyle		(Gäller för Lite, Mini, Flash, Freedom) Anslut glukosmätaren med specifik överföringskabel.
Precision Xceed		Anslut glukosmätaren till sändaren med specifik överföringskabel.
OneTouch Ultra		(Gäller för Ultra, Ultra 2) Anslut glukosmätaren med specifik överföringskabel.
OneTouch Ultrasmart		Anslut glukosmätaren med specifik överföringskabel. Tryck på vänstra svarta knappen.
GlucoCard X-meter		Anslut glukosmätaren med specifik överföringskabel.
GlucoMen Visio		Anslut glukosmätaren med specifik överföringskabel. Starta mätaren med mitten- knappen. Observera hantering av serienummer på www.diasend.com .
GlucoSure Extra		Anslut glukosmätaren med specifik överföringskabel. Tryck på mätarens ON-knapp.
Linus		Anslut glukosmätaren med specifik överföringskabel.

2. SEND (överföring) lampan börjar blinka.

3. Invänta att lampan blinkat färdigt och OK lampan tänds. Värdena finns nu på www.diasend.com. *Om överföringen bryts och ERROR (fel) lyser – prova igen. Blir det fortfarande fel kontakta support.*

SEND – Snabb blinkning:

Överföring av information sker.

SEND – Långsam blinkning:

Sändaren är redo att anslutas till en enhet för överföring.


OK indikerar resultatet av senaste överföring.

OK blinkar vid uppstart då den ansluter till nätet samt gör uppdateringskontroll.

ERROR (fel) lyser om överföringen går fel. Detta kan ske då det är problem i GSM-nätet.



IR: De enheter som har IR överföring skall riktas hitåt.

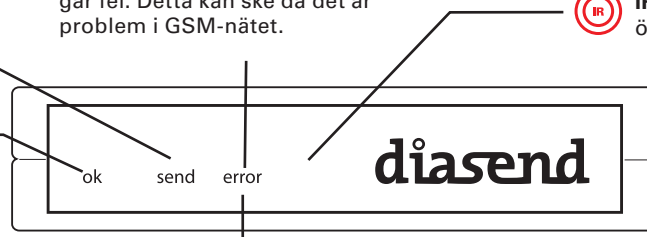

Andra indikationer: Om ERROR(fel) blinkar långsamt betyder det att täckningen i GSM nätet är otillräcklig för att överföring skall kunna ske. Inträffar detta prova att flytta sändaren.

3 SE INFORMATIONEN PÅ WWW.DIASEND.COM

Genom att logga in på www.diasend.com ser du den överförda informationen som visas i grafer, tabeller och statistik.

Support: 031 741 17 85
diasend@aidera.se
www.diasend.com

diasend
det enda som passar alla